

TherModiag[®]

FOLLOW-UP TO DECIDE

GUIDE RAPIDE D'UTILISATION



**DISPOSITIF MÉDICAL
NON INVASIF DE MONITORING
DE LA TEMPÉRATURE CENTRALE**

Version : TH01_Sy01_QKG_V2_4-FR

F2D
MEDICAL


INSTALLER

Brancher les différents éléments :



Branchez la station de recharge (1+2) à une prise secteur - la prise se situe sous la station.
Insérez le support de terminal (3) sur la base.

- ✓ Le voyant vert s'allume.
- ✓ Le support doit être incliné vers l'arrière - et non vers l'avant.

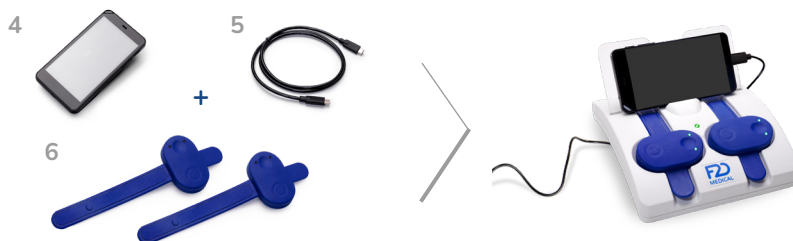

Connectez le terminal (4) à la station (1) avec le câble USB-C (5) - la prise USB-C se situe sous la station. **Allez jusqu'au "clic"**. Posez le terminal sur son support. Il restera branché tout au long de l'utilisation.

Voyants brassards

- ✓ **Vert clignotant** : le brassard est en charge.
- ✓ **Vert fixe** : charge à 100 % (autonomie de 24h)

Positionnez les 2 brassards (6) sur la base dans leurs empreintes. Rangez les

❗ **Rechargez Thermodiag minimum 6 heures avant utilisation.**

🗂 **Rangez les boîtes vides dans la mallette pour assurer la traçabilité réglementaire.**

Pour passer à l'étape suivante, vérifiez que toutes les leds sont allumées.

Si ce n'est pas le cas, vérifiez que la station est bien branchée à une prise secteur alimentée en électricité.

CONNECTER

1. Allumer le terminal

» Maintenez le bouton d'allumage enfoncé pendant 3 secondes.

✓ **3 icônes s'affichent à l'écran** : 2 gris (température et brassard) et 1 vert (terminal).

» Appuyez sur le bouton **DÉMARRER** à droite et renseignez les infos du patient.



Informations du patient

1 Service hospitalier 2 ID du patient 3 Sexe 4 Âge 5 Taille (cm) 6 Poids (kg)

Service hospitalier
f2d

Annuler

Suivant

» Vérifiez les informations.

Si tout est ok :

appuyez sur **"Démarrer l'acquisition"**.

Si ce n'est pas le cas,
appuyez sur **"Éditer"** pour
effectuer les modifications.

Informations du patient

ID du patient: mht
Service hospitalier: f2d
Sexe: Female
Âge: 39
Taille (cm): 163.0
Poids (kg): 54.0
ID de la tablette de surveillance: 0b37f7bd-0a9c-49c6-9127-6184a692a38b

Éditer

Démarrer l'acquisition

💡 Si l'icône du terminal est orange + message : **"La Monitoring tablet n'est pas connectée"**
Continuez la procédure normalement. Le terminal est en train de se connecter au réseau, l'icône passera au vert un peu plus tard.



CONNECTER


2. Appairer le brassard



Prenez un brassard dont les voyants sont verts et fixes. Posez-le sur la table ou dans votre main, en dehors de la station.

» Appuyez sur le bouton marche/arrêt du brassard (🔌).

💡 Le creux sur le boîtier du brassard n'est pas un bouton, mais un capteur.

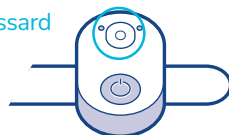


- ✓ Les LEDs bleues clignotent.
- ✓ Le nom du brassard s'affiche sur le terminal.

» Cliquez sur le nom du brassard affiché sur le terminal pour le sélectionner.



- ✓ Après quelques secondes, les LEDs du brassard passent au vert clignotant.
- ✓ La température s'affiche sur l'écran de la tablette.
- ✓ L'icône brassard est désormais en vert sur le terminal.

L'icône de température passera en vert au bout de 20 à 30 minutes.

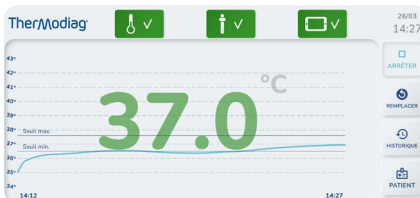


POSER

Positionner le brassard au bras droit ou gauche du patient.


Une fois connecté au terminal, **posez le brassard** de manière à avoir les **7 capteurs à gauche** et le **capteur optique face à vous**.



» Sortez le consommable de son emballage individuel. Présentez-le, films protecteurs opaques **vers le haut**.

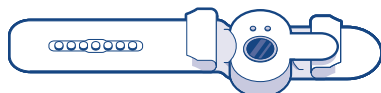

💡 **Ne retirez pas tout de suite les films protecteurs opaques.**

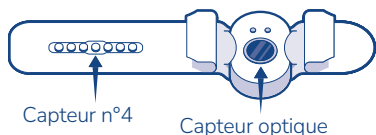


» Glissez le brassard dans les encoches pour qu'il s'insère **entre le tissu intissé et la membrane rose très fine**. D'abord la **partie gauche**, puis la **droite**.



» **Dépliez** la languette intissée.

» **Retirez** les films protecteurs rectangulaires.

❗ **Positionnez-vous face au patient. Le brassard est à insérer vers l'avant : entre la poitrine et le bras.**

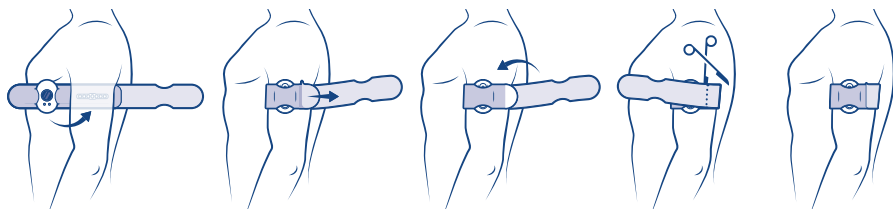

1. Repérez l'artère axillaire - sous le biceps, face intérieure du bras.

2. Collez Thermodiag en alignant le capteur 4 avec le repère de l'artère axillaire sur la peau du patient, le plus haut possible près du creux axillaire.

3. Retirez le dernier film protecteur (demi-lune) pour attacher le consommable à l'aide de la bande intissée.

4. Découpez le surplus de la bande intissée pour éviter un arrachement involontaire lors des manipulations.

💡 **Le petit doigt doit pouvoir passer sans forcer entre le consommable et la peau.**
Brassard sur le bras droit : les leds sont en haut du boîtier.
Brassard sur le bras gauche : les leds sont en bas du boîtier.

UTILISER

1. Surveiller les données

» La température et les tendances s'affichent sur l'écran du terminal.

Des informations de seuils ont été définies en amont. La température s'affichera en orange si un des seuils est dépassé.

2. Enregistrement des données

» Pendant l'acquisition de température, les informations sont automatiquement sauvegardées dans le terminal.

Vous avez accès à tout l'historique en cliquant sur **HISTORY**.

REEMPLACER


❗ Changez le brassard toutes les 24 heures.

1. Préparer le nouveau brassard

» **Prenez le brassard non utilisé sur la base** «les voyants doivent être verts et statiques».

» **Insérez le brassard** dans sa housse. Allez voir la page «installer» pour suivre les instructions.

» **Sur le terminal** : Cliquez sur le bouton **REPLACE**.

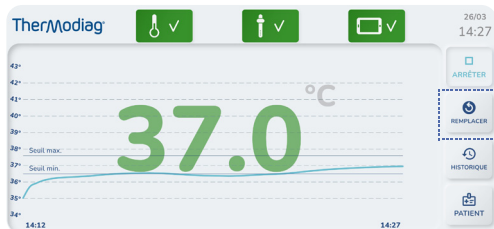

2. Remplacer

» **Retirez l'ancien brassard** du bras du patient. Mettez-le de côté.

» **Installez le nouveau brassard**. Allez voir la page «Équiper» pour suivre les instructions.

» **Appuyez sur le bouton marche/arrêt** du nouveau brassard mis en place (⏻).

✓ Les leds bleues clignotent.

» **Sélectionnez le nom** du brassard qui vient de s'afficher sur le terminal.

✓ Après quelques secondes, les leds du brassard passent au vert clignotant.

REEMPLACER

3. Nettoyer et recharger l'ancien brassard

- » **Retirez la housse** de l'ancien brassard. Jetez-la à la poubelle.
- » **Nettoyez le brassard** délicatement selon la procédure décrite dans la notice d'utilisation IFU.
- » **Remplacez le brassard** dans son empreinte sur la station de recharge afin qu'il se charge.

DÉPANNAGE RAPIDE

PROBLÈME : Les LEDs ne s'allument pas lorsque le brassard est posé sur la station de recharge.

SOLUTION : Vérifiez que la station est bien branchée à une prise secteur alimentée avec du courant et que les brassards sont correctement positionnés dans leurs empreintes.

PROBLÈME : Le terminal ne s'allume pas ou indique que le terminal n'est pas alimenté.

SOLUTION : Vérifiez que le câble USB est bien branché.

PROBLÈME : Le brassard ne se connecte pas au terminal.

SOLUTION : Re appuyez sur le bouton d'appairage du brassard. Si rien ne se passe, redémarrez le terminal, redémarrez l'acquisition et réessayez l'appairage.

PROBLÈME : Données manquantes.

SOLUTION : Assurez-vous que le brassard est bien positionné.

SIGNIFICATION DES VOYANTS BRASSARD

Brassard sur la base :

- » **Vert clignotant :** en charge.
- » **Vert statique :** brassard chargé à 100%.

Brassard en dehors de la base :

- » **Bleu clignotant :** en attente de connexion au terminal.
- » **Vert clignotant :** brassard connecté au terminal en cours de collecte de données.
- » **Vert clignant 2 pulsations rapides :** le brassard est trop loin du terminal et n'arrive plus à communiquer avec.
- » **Jaune clignotant :** Batterie au plus bas, remplacez le brassard.



F2D
MEDICAL

2 rue Jean Perrin
14 460 Colombelles - France



SAV : 06 58 91 86 07
contact@f2d-medical.fr